




ソフトクリップフック

SOFT CLIP® HOOK

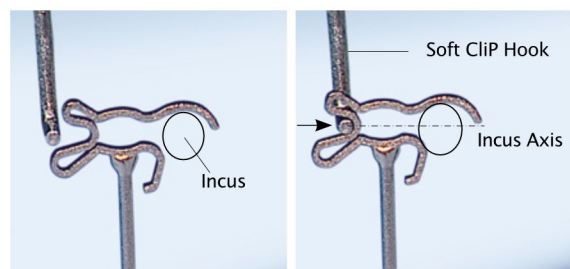

最初広い開口部できぬた骨に設置

プロセスは2ステップで所定の位置に設置されます

画像提供
G. Schimanski

画像提供
G. Schimanski

ソフトクリップピストンの挿入を容易にする

クルツは、ステープスを標準的に挿入するために、Soft Clip Hookを特別に開発しました。プロセス(ピストン)のシャフトを穿孔したあぶみ骨底板にセットした状態で、ソフトクリップフックを使ってClipプロセスをきぬた骨長脚に優しく押し付けます。これにより、内耳方向への過剰な浸入とプロセスの望ましくない回転運動のリスクを低減します。

必要な力の軽減

フックは操作中、ループのくぼみにしっかりと固定します。これにより、Clipプロセスを力を抑えて穏やかに取り付けることができます。

House Ear Institute, Los Angeles, USAのJohn W. House博士と共同で開発しました。

品番	名称	規格
8000 127	ソフトクリップフック	φ0.2mm

素材：ステンレス製、再滅菌可能(AC)

医療機器届出番号:20B3X10018800100 販売名クルツ 鼓室形成手術セット

製造販売業者

シカゴ東京メディカル株式会社

販売業者



クルツメディカル株式会社
〒151-0066
東京都渋谷区西原1丁目38-3
TEL 03-6284-0598



www.kurzmedical.jp

取扱店

■本カタログ記載しております仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
■ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。

03/2018-M9600320-03/2023-K5a